

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHẨU TRANG Y TẾ SAKATA**

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

1. Thành phần cấu tạo

- 4 lớp vải không dệt, thun đeo tai
- 4 nếp gấp, không thấm nước, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng kim loại không đàn hồi, không xê dịch trong quá trình phẫu thuật.

2. Công dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

Công dụng:

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

Cách dùng:

Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

Cảnh báo thận trọng :

Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

Đóng gói:

50 chiếc/túi nylon/hộp giấy.

Bảo quản:

Đậy kín nắp sau khi sử dụng, để nơi khô mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực tiếp, Bảo quản ở nhiệt độ 5°C-40°C.

Hạn dùng: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CHÍ THÀNH**