

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
DECAY**

**1. THÀNH PHẦN**

Trong 10ml dung dịch có chứa:

Tinh dầu Hương nhu.....3,5mg

Tinh dầu Đinh Hương.....3,5mg

Tinh dầu Ngõ núi.....3mg

Tinh dầu Duối nhám.....3mg

Ethanol và nước cất vừa đủ.

**2. CÔNG DỤNG**

- Ngăn ngừa và chữa trị nhiễm trùng răng, sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu, hôi miệng.

**3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG**

- Người đang bị viêm nhiễm khoang miệng, viêm lợi, lở loét miệng, bị nhiệt miệng.

- Người bị sâu răng, hôi miệng.

- Người bị viêm chân răng, chảy máu chân răng và đang gặp các vấn đề về răng miệng..

**4. CÁCH DÙNG**

Vệ sinh răng miệng trước khi dùng.

Nhỏ 2-3 giọt lên vị trí bị viêm đau, ngâm 7 đến 10 phút rồi nhổ bỏ, trẻ em dưới 3 tuổi dùng bông chấm.

Tiếp tục sử dụng sau khoảng 3 đến 4 giờ.

**5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

**6. BẢO QUẢN**

- Luôn giữ chai ở trạng thái đóng nắp và để nơi khô mát.

**Sản phẩm của :**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMA MR THÀNH**


Địa chỉ: Số 40B/43/158 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Sản xuất tại:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AVA GREEN**

Địa chỉ: Khu 4B, Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

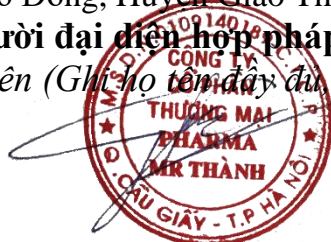

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Thành*