

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

**Khẩu trang Y tế EUPHAR MASK**

**1. THÀNH PHẦN**

Khẩu trang Y tế EUPHAR MASK cấu tạo gồm:

- Các lớp vải: gồm 4 lớp, trong đó: 3 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có gấp nếp và 1 lớp vải lọc;
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa (trong có lõi kim loại hoặc không có);
- Dây đeo thun chắc chắn.

**2. CÔNG DỤNG**

Dùng trong y tế. Giúp: che phủ mũi miệng, ngăn khói bụi và vi khuẩn xâm nhập, giúp phòng chống các bệnh nguy hiểm qua đường hô hấp, chống tia uv.

**3. CÁCH DÙNG**

- Dùng tay nhẹ nhàng làm giãn các lớp khẩu trang.
- Dùng tay kéo hai dây khẩu trang sang 2 bên, áp sát mặt và đeo 2 bên tai.
- Dùng tay để căn chỉnh thanh mũi để vừa với sống mũi
- Kiểm tra khẩu trang có thể che phủ được sát mắt đến tận dưới cằm

**Chú ý:**

- Nên điều chỉnh khẩu trang ôm khít khuôn mặt tránh bụi bẩn lọt vào.
- Tốt nhất chỉ sử dụng khẩu trang 1 lần.

**4. BẢO QUẢN**

Bảo quản trong điều kiện bình thường.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi họ tên)



**VŨ NGỌC ĐƯƠNG**