

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THỂ KỸ MỚI

TRỤ SỞ: SỐ 3 PHỐ AN TRẠCH, P. QUỐC TỬ GIÁM, Q. ĐÔNG ĐÀ, TP.
HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tên trang thiết bị: Khẩu trang y tế thông thường

1. Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước và lau khô trước khi sử dụng khẩu trang.
2. Mở hộp, bao gói để lấy sản phẩm
3. Đeo khẩu trang ngay ngắn giữa sống mũi. Một tay giữ khẩu trang, một tay đeo dây qua tai hoặc qua gáy, dùng 2 tay kéo rộng khẩu trang lên xuống để khẩu trang có thể che phủ từ phần sát mắt đến dưới cằm.
4. Bóp nhẹ nếp khẩu trang để ôm sát vào mũi.

Lưu ý:

- Khẩu trang chỉ dùng 1 lần không tái sử dụng sản phẩm.
- Sau khi sử dụng, cầm vào quai đeo để tháo khẩu trang ra, tránh chạm vào thân ngoài khẩu trang.
- Bỏ sản phẩm đã sử dụng vào thùng rác.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PT THỂ KỸ MỚI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Thu Hiền