



18.5cm

10 cm

18.5cm

10 cm

BỂ NỐI

NY Protect Mask

NHUY COMPANY

4 LAYER FACE MASK

NHUY COMPANY

NY Protect Mask

4 LAYER MEDICAL FACE MASK

100% Giấy Lọc Kháng Khuẩn
100% Antibacterial Filter Paper

Ngăn Chặn Tối Đa
Max Prevent

Bụi bẩn
Vi khuẩn
Phân hoa
Mùi hôi



50 1
CÁI HỘP
PCS BOX



Màu xám - Gray

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM PRODUCT CHARACTERISTICS

- Khẩu trang có tác dụng cực tốt để ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp.
- Face mask work extremely well to prevent bacteria, dust and respiratory infections.
- Thiết kế 4 lớp siêu bảo vệ, 100% chất liệu sạch, mềm mịn, thoáng khí, không gây kích ứng da.
- 4 layers design protect, 100% clean material, soft, fresh air, no skin irritation.
- Lớp ngoài & trong : vải không dệt, lớp giữa: giấy lọc kháng khuẩn
- Outer & inner layers: non-woven fabric, middle layer: antibacterial filter paper
- Thanh nẹp mũi định hình, thuận tiện đeo có gắn không đau tai.
- Shaped nose splint, elastic band comfortable with ears.

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM PRODUCT APPLICATIONS

1. Bệnh viện, phòng khám, nha khoa
2. Hospital, clinics, dentistry.
3. Trung tâm thẩm mỹ
3. Beauty center.
3. Môi trường công nghiệp
3. Industrial environment.
4. Phòng dịch bệnh
4. Disease prevention.
5. Sử dụng chống khói bụi hàng ngày
5. Use daily against dust.



NHUY COMPANY

NY Protect Mask

4 LAYER MEDICAL FACE MASK

100% Giấy Lọc Kháng Khuẩn
100% Antibacterial Filter Paper

Ngăn Chặn Tối Đa
Max Prevent

Bụi bẩn
Vi khuẩn
Phân hoa
Mùi hôi



50 1
CÁI HỘP
PCS BOX



Màu xám - Gray

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INSTRUCTION

1. Đặt phần gọng khẩu trang lên sống mũi, phần màu trắng tiếp xúc với da mặt.
1. Place the rim of the mask on the nose, the white side of the mask touches the face.
2. Đeo dây thun vào tai sau, bóp nhẹ gọng để ôm sát sống mũi.
2. Put on the elastic band on the back ear, gently squeeze the rim to hug the nose bridge.
3. Kéo và chỉnh khẩu trang để ôm khít toàn bộ mũi, miệng và cằm.
3. Pull and adjust the mask to fit the entire nose, mouth and chin.
4. Chỉ dùng 1 lần.
4. Only use 1 time.



NY PROTECT MASK THE BEST FOR YOU!

Sản xuất bởi - Product by:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ Ý
NHU Y IMPORT EXPORT SERVICES PRODUCTION COMPANY LIMITED
 Đ/C: C4/41A Nguyễn Thị Sáu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A,
 Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, VN.
 Add: C4/41A Nguyễn Thị Sáu Street, Hamlet 3,
 Vĩnh Lộc A Commune, Bình Chánh Dist., HCM City, VN.
 Web: nhuycompany.com - Email: info@nhuycompany.com

MADE IN VIETNAM
MFG: 04/2020
EXP: 04/2025

11 cm