

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (Mã sản phẩm: NY Protect Mask)**

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHỰ Ý**

Địa chỉ công ty: C4/41A Nguyễn Thị Sura, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHỰ Ý

Địa chỉ cơ sở sản xuất: C19/10T7, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

**1. Thành phần cấu tạo**

- Sản phẩm gồm 3 lớp vải không dệt, 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn từ PP
- 4 nếp gấp, không thấm nước, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng kim loại không đàn hồi, không xê dịch trong quá trình sử dụng.

**2. Công dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.**

**Công dụng:**

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

**Cách dùng:**

Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

**Cảnh báo thận trọng :**

Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

**Đóng gói:**

10 cái/túi nilong, 5 túi/1 hộp giấy

**Bảo quản:**

Đậy kín nắp sau khi sử dụng, để nơi khô mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực tiếp, Bảo quản ở nhiệt độ 5°C-40°C.

**Hạn dùng:** 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**



**GIÁM ĐỐC**

*Đoàn Ngọc Trung*