

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHỰ Ý

Địa chỉ: C4/41A Nguyễn Thị Sura, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NHỰ Ý

Địa chỉ cơ sở sản xuất: C19/10T7, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Email :

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (NY Protect Mask)

1. Thông tin cấu trúc sản phẩm

- Sản phẩm gồm 3 lớp vải không dệt, 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn từ PP
- 4 nếp gấp, không thấm nước, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng kim loại không đàn hồi, không xê dịch trong quá trình sử dụng.

2. Kiểu dáng, kích thước

- Kích thước: Chiều dài 17,5cm; chiều rộng 9,5cm
- Đảm bảo che kín mũi và miệng

3. công dụng:

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

4. Cách sử dụng

- Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

- Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

5. Quy cách đóng gói

- 10 cái/túi nilong, 5 túi/1 hộp giấy

6. Hạn sử dụng

Ghi trên bao bì

7. Bảo quản

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 5⁰C-40⁰C

Số lô/ ngày sản xuất.....HSD

Số lưu hành/ Số công bố TTBYT:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu) **GIÁM ĐỐC**
NHỰ Ý
Đoàn Ngọc Trung