

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ PAVO (MEDICAL FACE MASK PAVO)**

1. CẤU TẠO

- Tên sản phẩm: Khẩu trang Y tế Pavo (MEDICAL FACE MASK PAVO)
- Chung loại: Khẩu trang Y tế 3 lớp; Khẩu trang Y tế 4 lớp
- Mã sản phẩm: Vina.04, Vina.05
- Cấu tạo gồm:
 - Các lớp vải: 2 hoặc 3 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có gấp nếp; Lớp lọc;
 - Thanh nẹp mũi bằng nhựa (trong có lõi kim loại hoặc không có);
 - Dây đeo thun chắc chắn.

2. CÔNG DỤNG

Dùng trong y tế, giúp che phủ mũi miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường dịch bệnh, môi trường độc hại nguy hiểm.

3. CÁCH DÙNG

- Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước rửa tay khô trước khi sử dụng khẩu trang.
- Để mặt xanh hướng ra phía ngoài, phần có thanh nẹp ở bên trên.
- Đặt khẩu trang ngay ngắn giữa sống mũi. Một tay giữ khẩu trang, một tay đeo dây khẩu trang qua tai hoặc qua gáy. Dùng hai tay kéo rộng khẩu trang lên xuống để có thể che phủ từ phần sát mắt đến dưới cằm.
- Bóp nhẹ thanh nẹp để khẩu trang ôm sát vào mũi.
- Dùng 01 lần, không tái sử dụng sản phẩm.

4. BẢO QUẢN

Bảo quản trong điều kiện bình thường.

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Từ Ngọc Thọ
TỪ NGỌC THỌ