

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ

Để khẩu trang mang lại hiệu quả đúng như bạn mong muốn, việc tìm hiểu cách đeo khẩu trang y tế đúng cách rất quan trọng. Trên thực tế, nhiều người vẫn sử dụng khẩu trang hàng ngày mà không hề biết rằng họ vẫn có nguy cơ mắc phải bệnh dịch qua hệ hô hấp, qua tiếp xúc tay chỉ vì không dùng khẩu trang đúng cách. Để người dân có thể phòng tránh tốt nhất cho mình với khẩu trang y tế, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo cách đeo khẩu trang chuẩn như sau:

Đeo mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong

Đây là cách đeo cơ bản mà bạn cần phải biết khi sử dụng khẩu trang y tế một lần. Bởi lẽ, mặt xanh được sản xuất với tính thấm nước sẽ không thấm vào trong và mặt trắng có tính hút ẩm, giúp bạn dễ thở hơn khi đeo khẩu trang.

Chỉ cầm vào dây khẩu trang

Trong quá trình sử dụng khẩu trang, vi khuẩn có thể đã bám trên lớp bề mặt ngoài. Do đó, khi sử dụng, bạn chỉ sử dụng tay để cầm vào phần dây.

Thường xuyên rửa tay sạch trước khi đeo và sau khi tháo khẩu trang

Cách đeo khẩu trang y tế là bạn phải duy trì thói quen rửa tay thường xuyên nhất là sau khi đeo hay tháo khẩu trang.

Chỉ sử dụng một lần

Các khẩu trang y tế chỉ nên sử dụng một lần. Sau khi sử dụng bạn cần vứt vào thùng rác có nắp đậy để tránh lây lan vi khuẩn, virus.

Che kín cả mũi và cằm

Cách đeo khẩu trang y tế đẹp và đúng chuẩn là việc bạn sử dụng che kín cả mũi và cằm. Khi đeo, bạn cần vuốt cho phần gọng sát sát vào sống mũi. Kiểu đeo này cũng giúp với những người bị cận không bị hơi thở làm mờ kính gây khó khăn khi nhìn.

Tránh sờ tay vào bề mặt khẩu trang

Thói quen sờ tay vào bề mặt khẩu trang có thể là con đường làm lây lan virus corona và các bệnh truyền nhiễm nhanh chóng, đơn giản mà bạn không ngờ đến. Khi có các tiếp xúc này, cần rửa tay với xà phòng sát khuẩn.



GIÁM ĐỐC

Trần Lệ Thanh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẨU TRANG Y TẾ TANAPHAR- 3 LỚP (ĐA TIẾT TRUNG)/
TANAPHAR MEDICAL FACE MASK- 3 LAYERS (STERILIZED)

Công dụng:
Khẩu trang y tế TANAPHAR- đa tiết trung *dupe* cấu tạo bởi 3 lớp, có tác dụng ngăn mũi, khỉ, bụi mịn, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.

- Điểm nổi bật:

- + Lớp vải lọc khi không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da.
- + Thanh tạ mềm dễ dàng hình, giúp dễ dàng đeo khẩu trang và tạo độ kín, ôm tròn khuôn mặt.

Đeo chắc chắn, do có gờ tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

- Cách sử dụng:

Mở khẩu trang, bóc thanh tạ mềm, tạo độ kín.

+ Chụp khẩu trang kín mũi và miệng.

+ Kéo dây thun đeo vững qua tai.

- Lưu ý: Chỉ sử dụng 1 lần.

- Tên đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Tanaphar.

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Bích Hài- Thanh Oai- Hà Nội.

HLDG DAN SP DỤNG



KHAU TRANG Y TE TANAPHAR- 4

ANA LV/

- Công ty Cổ phần Tanaphar PIAR MEDICAL FACE MASK- 4 LAYERS

Khẩu trang y tế TANAPHAR được cấu tạo bởi 4 lớp, có tác dụng ngăn mũi, mũi, bụi mịn, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.

- Điểm nổi bật:

+ Lớp vải lọc khi hít thở, thoáng khí, không gây dị ứng da.

+ Thanh thép để định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trên khuôn mặt.

+ Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

- Cách sử dụng:

+ Mở khẩu trang, bóc thanh thép định hình, tạo độ kín.

* Chạm khẩu trang kín mũi và miệng.

* Kéo dây thun đeo vòng qua tai.

- Lưu ý: Chỉ sử dụng 1 lần.

- Tên đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Tanaphar.

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Phố Hòa- Thanh Oai- Hà Nội.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



KHẨU TRANG Y TẾ TANAPHAR- 4 LỚP (DÀ TIẾT TRÙNG)/ TANAPHAR MEDICAL FACE MASK- 4 LAYERS (STERILIZED)

- **Công**

Khẩu trang y tế TANAPHAR- da tiết trùng được cấu tạo bởi 4 lớp, có tác dụng ngăn mũi, họng, bụi mịn, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sản phẩm hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.

- Điểm nổi bật:

- + Lớp vải lọc khi hít thở thoải mái, thoáng khí, không gây dị ứng da.
- + Thanh tua mềm dẻo định hình, giúp dễ dàng đeo khẩu trang và tạo độ kín, ôm sát khuôn mặt.

Đay đeo chắc chắn, do có gian tịt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

- Cách sử dụng:

- + Rửa khẩu trang, bề mặt thanh tua mềm, tạo độ kín.
- + Chạm khẩu trang kín mặt và miệng.

Kéo dây thun đeo vững qua tai.

- Lưu ý: Chỉ sử dụng 1 lần.

- Tên đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Tanaphar.

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai- Bích Hòa- Thanh Oai- Hà Nội.