

## CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT PHARMA

Địa chỉ: Thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ

- Bước 1:** Mở bao gói, lấy khẩu trang đặt vào lòng bàn tay,  
**Bước 2:** Cầm hai quai đeo đặt khẩu trang bên dưới cằm, phần mũi hướng lên.  
**Bước 3:** Đeo hai dây vào tai, kéo thân khẩu trang che vùng mũi, mặt.  
**Bước 4:** Đặt đầu ngón tay hai bên trên phần mũi bằng kim loại. Vuốt phần mũi của khẩu trang theo hình dạng của mũi.  
**Bước 5:** Chính lại khẩu trang cho vừa vặn.



**GIÁM ĐỐC**  
**Trịnh Đình Thiện**