

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (Mã sản phẩm: TL GARMACO)

CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG

Địa chỉ công ty: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

1. Thành phần cấu tạo

- 3 lớp vải không dệt, 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn từ PP, thun đeo tai
- 3 nếp gấp, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng kim loại không đàn hồi, không xê dịch trong quá trình phẫu thuật.

2. Công dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

Công dụng:

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

Cách dùng:

Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

Cảnh báo thận trọng :

Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

Đóng gói:


50 cái/túi nilong, 1 túi/1 hộp giấy

Bảo quản:

Đậy kín nắp sau khi sử dụng, để nơi khô mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực tiếp, Bảo quản ở nhiệt độ 5°C-40°C.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2020

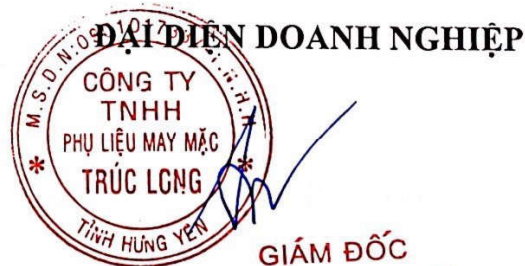

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THU NGUYỆT