

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG
Địa chỉ: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC TRÚC LONG
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: Fax:
Email : info@tlgarmaco.com

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (TL GARMACO)

1. Thông tin cấu trúc sản phẩm

- Sản phẩm gồm 3 lớp vải không dệt, 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn từ PP, thun đeo tai
- 3 nếp gấp, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng kim loại không đàn hồi, không xê dịch trong quá trình phẫu thuật.

2. Kiểu dáng, kích thước

- Kích thước: Chiều dài 17cm; chiều rộng 10cm
- Đảm bảo che kín mũi và miệng

3. công dụng:

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi thông thường, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

4. Cách sử dụng

- Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.
- Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

5. Quy cách đóng gói

- 50 cái/túi nilong, 1 túi/1 hộp giấy

6. Hạn sử dụng

Ghi trên bao bì

7. Bảo quản

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 5⁰C-40⁰C


Số lô/ ngày sản xuất.....HSD

Số lưu hành/ Số công bố TTBYT:

Hưng Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

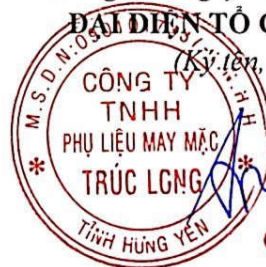

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THU NGUYỆT