

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN GREENSKIN ORGANIC**

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Ngăn khởi bụi, vi khuẩn, virus xâm nhập. Phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường, trên tàu xe hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công cộng và môi trường công nghiệp độc hại.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Hai tay cầm 2 sợi thun của khẩu trang áp sát khẩu trang vô mặt và đeo thun vào 2 bên tai. Một tay kéo phần trên khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và trán, sau đó bóp thanh nẹp mũi để cho ôm sát, đồng thời tay còn lại kéo phần dưới khẩu trang cho bao phủ xuống cằm.

CHÚ Ý:

Không sử dụng chung khẩu trang với người khác.

Chỉ sử dụng một lần.

BẢO QUẢN:


Bảo quản ở nhiệt độ phòng, để nơi khô ráo, sạch sẽ tránh ẩm ướt. Không được để gần nơi bụi bặm, hóa chất độc hại.

HẠN SỬ DỤNG

5 năm kể từ ngày sản xuất.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Giám Đốc

Lang Thinh Thu Nhi