

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XỊT HỌNG THẢO DƯỢC HERBAL THROAT SPRAY

1. THÀNH PHẦN

Xịt họng thảo dược Herbal Throat Spray gồm các thành phần cấu tạo:

1. Bình xịt phun sương dung dịch được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân bình, ống dẫn.
2. Dung dịch xịt họng thảo dược được chứa trong bình xịt phun sương dung dịch với công thức điều chế cho 100ml thành phẩm:

TT	Thành phần	Khối lượng/100ml
1.	Mật ong	2 020mg
2.	Trần bì	800 mg
3.	Tinh dầu húng chanh (tần dày lá)	200 mg
4.	Kẹo ong Propolis	30.5 mg

Phụ liệu: Ethyl alcohol, Glycerin, Sorbitol 70% solution, Menthol, Acid citric, Sucralose, Camphor, Sodium benzoate, Hương cam, Nước cất vừa đủ 100ml.

2. CÔNG DỤNG

- Sát trùng đường hô hấp, hỗ trợ bảo vệ và tăng cường miễn dịch đường hô hấp.
- Hỗ trợ các triệu chứng ho do nhiễm lạnh, cảm lạnh, ho do dị ứng, giảm đau họng.

3. CÁCH DÙNG

- Mở nắp, lắc đều chai trước khi dùng.
- Xịt trực tiếp vào khoang miệng, cổ họng 2-3 nhát rồi nuốt vào bụng.
- Dùng 1-3 lần/ngày hoặc sử dụng nhiều hơn nếu cần thiết.
- Nên dùng hằng ngày.

4. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi.

5. LƯU Ý

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

- Những người đang dùng thuốc điều trị hoặc đang nằm viện nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

6. BẢO QUẢN

- Nơi khô mát dưới 30°C

7. ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

Sản phẩm của:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3N PHARMA

Địa chỉ: Số 2, Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất tại:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Hồng Phát

Địa chỉ: Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3N PHARMA



