

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẨU TRANG Y TẾ DÙNG 1 LẦN

1. Yêu cầu chung:

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng các sản phẩm KHẨU TRANG Y TẾ DÙNG 1 LẦN do Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành sản xuất

2. Công dụng:

Dùng che phủ mũi miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, độc hại nguy hiểm.

3. Thành phần, thông số kỹ thuật

- Dây đeo: Dây đeo bằng sợi polyester và spandex, độ giãn thun thoải mái. Giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo vệ sinh an toàn khi sử dụng, không gây dị ứng

- Các lớp vải :

+ Lớp vải ngoài : tác dụng chống thấm nước, ngăn cản các hạt chất lỏng, bọt bắn kích thước lớn.

Màu sắc: màu xanh, hồng, vàng, trắng ..

Định lượng 30g (- 5g)

+ Lớp trong : mặt vải quay vào trong tiếp xúc trực tiếp với da mặt, có khả năng thấm hút nước, mồ hôi.

Định lượng 30g (-5g)

+ Lớp vi lọc (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng nhất. Yêu cầu đối với lớp vi lọc là thấm khí, không thấm nước.

Định lượng 20g (+5g)

- Thanh nẹp mũi : Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa có tác dụng kẹp kín khẩu trang lên sống mũi

- chiều rộng 95mm ($\pm 5\%$)

- chiều dài 180mm ($\pm 5\%$)

- Số lớp : có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng . Một số quy cách: 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp,..

4. Bao gói :

Sản phẩm có bao gói theo yêu cầu của khách hàng. Một số quy cách đóng gói
Khẩu trang y tế : 1 cái/ gói, 50 cái/ hộp,

5. Hướng dẫn sử dụng:

1. Rửa sạch tay, lau khô tay bằng dung dịch vô trùng trước khi thao tác



2. Mở bao đựng sản phẩm tại vị trí OPEN
3. Đưa sản phẩm ra khỏi bao đựng sản phẩm
4. Khi đeo chỉ cầm vào 2 dây khâu trang vòng qua 2 tai
5. Vuốt cho phần gọng nẹp sát vào sống mũi
6. Chỉnh khâu trang che kín cả mũi và cằm
7. Khi tháo khâu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn
8. Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khâu trang

Lưu ý :

- *Khâu trang chỉ sử dụng 1 lần*
- *Khi mang khâu trang tuyệt đối không sờ tay vào bề mặt khâu trang , vì động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.*
- *Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khâu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khâu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.*

6. Chống chỉ định : Không có

7. Cảnh báo an toàn: Sử dụng an toàn khi bao gói không bị rách – hở và sản phẩm còn hạn sử dụng

8. Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo đảm bảo vệ sinh

9. Vận chuyển : Sản phẩm được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có mái che mưa nắng, hộp vệ sinh. Không được để các vật nặng đè lên thùng sản phẩm tránh làm vỡ thùng, làm hỏng sản phẩm

10. Thông tin tra cứu : Ngày tiết trùng (nếu có) , Lô sản xuất , Hạn sử dụng.: xem trên tem nhãn bao bì, thùng sản phẩm.

11. Thông tin liên hệ :

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Địa chỉ: Lô 52,53,54, Đường N3 C CN An Xá -Mỹ Xá -TP. Nam Định,Tỉnh Nam Định , Việt Nam

ĐT: 0228 3 666 968 Fax : 0228 3 672 311 Website://www.anlanhgauze.com

Nam Định, Ngày 25 Tháng 02 Năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN CHÍ DŨNG**

