

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT**

**Số 27, ngõ 46, phố Hòa Nam, phường Ô Chợ Dừa,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế : tăm bông vô trùng dùng lấy mẫu xét nghiệm

Tên cơ sở sản xuất: JIANGSU KANGJIE MEDICAL DEVICES CO., LTD

Địa chỉ cơ sở sản xuất : No. 6 Zhanbei Road, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province, China.

Cách lấy bệnh phẩm và bảo quản tại chỗ:

1. Dịch mũi

- Yêu cầu bệnh nhân ngửa mặt khoảng 45⁰.
- Đưa tăm bông vào dọc theo sàn mũi tới khoang mũi họng. để tăm bông cho thấm ướt dịch mũi sau đó xoay tròn , miết mạnh vào thành mũi và rút ra từ từ.
- Sau khi ngoáy mũi xong, tăm bông được chuyển vào môi trường bảo quản bệnh phẩm (đầu tăm bông phải nằm ngập trong môi trường vận chuyển). Cắt bỏ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống chứa môi trường vận chuyển vi rút.
- Đóng nắp, xiết chặt, bọc ngoài bằng giấy parafilm (nếu có)

2. Dịch họng

- Yêu cầu bệnh nhân há to miệng.
- Dùng dụng cụ đè lưỡi cố định lưỡi bệnh nhân xuống sàn dưới vòm họng.
- Đưa tăm bông vào vùng hầu họng để cho dịch họng thấm ướt đầu tăm bông, sau đó miết mạnh và xoay tròn tăm bông tại khu vực 2 a-mi-đan và thành sau họng để thu thập tế bào nhiễm.
- Sau khi ngoáy họng xong, tăm bông được chuyển vào môi trường bảo quản bệnh phẩm (đầu tăm bông phải nằm ngập trong môi trường vận chuyển). Cắt bỏ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống chứa môi trường vận chuyển vi rút.
- Đóng nắp, xiết chặt, bọc ngoài bằng giấy parafilm (nếu có).
- Dán nhãn trên mỗi lọ bệnh phẩm, ghi mã số, họ tên, tuổi bệnh nhân, loại bệnh phẩm, ngày lấy bệnh phẩm trên tube thu thập bệnh phẩm.

- Điền đầy đủ thông tin vào phiếu xét nghiệm và gửi kèm với mẫu bệnh phẩm

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ
TIẾP VẬN VĨNH CÁT**



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Nguyễn