

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ ĐÚNG CÁCH VÀ AN TOÀN

Cách sử dụng:


Vệ sinh tay sạch sẽ, xoay khẩu trang đúng chiều, khẩu trang có hai mặt, đeo mặt trắng vào trong mặt có màu sắc khác nằm ở phía ngoài.

Đặt nếp mũi lên trên.

Đeo dây vào tai, ấn chặt nếp mũi.

Điều chỉnh cho vừa vặn sát mũi, miệng và kéo khẩu trang trùm kín mũi, miệng.

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

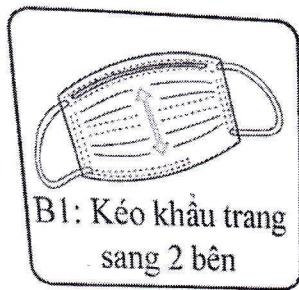

Lưu ý: Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Mục đích: Dùng để ngăn ngừa khói bụi, vi khuẩn xâm nhập, ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp.

Bảo quản: Để sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt. không để gần nơi hóa chất độc hại và không chổng chất vật nặng lên trên gây rách, vỡ bao bì.

Khuyến cáo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao.

Phiếu tiếp nhận cơ sở sản xuất số: **20000084/PCBSX-HCM**

Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn số: **xxxxxxxxxx/PCBA-HCM**

Giấy phép lưu hành số: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx/CFS/BYT-TB-CT**

Tiêu chuẩn cơ sở số: **01/2020/DADA**

Nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế: **ISO 13485:2016**

Nhà máy sản xuất: **CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT**

Địa chỉ: Villas 16-D9 Khu Sài Gòn Pearl-92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số lô:

Ngày sản xuất: (xem trên bao bì)

Hạn sử dụng: (xem trên bao bì)