

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### 1. Khẩu trang Y tế 4 lớp E-U Rose

**Bước 1:** Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt

**Bước 2:** Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai

**Bước 3:** Kéo nhẹ cạnh dưới qua cằm một chút, đặt gọng lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

Công dụng: ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp

#### Lưu ý:

- Khẩu trang chỉ dùng một lần. Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Đeo khẩu trang đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không dùng khẩu trang không rõ nguồn gốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW



GIÁM ĐỐC  
*Bùi Thị Phương*