



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Phòng 1906, Lầu 19, Tòa nhà Maple Tree Business Centre, Số 1060, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Tài liệu được xác nhận bằng chữ ký và có hiệu lực từ ngày ký

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Phạm Mạnh Tuấn
Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Dung dịch rửa iChem VELOCITY

REF 800-7217



Chỉ kê đơn ở Hoa Kỳ.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dung dịch rửa iChemVELOCITY là một dung dịch đệm để xả rửa định kỳ Hệ thống sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Thuốc thử này dùng để chẩn đoán *in vitro* bằng iChemVELOCITY.

NGUYÊN TẮC

Dung dịch rửa iChemVELOCITY là một dung dịch sẵn dùng được phát triển riêng để áp dụng trong Hệ thống sinh hóa nước tiểu iChemVELOCITY. Sử dụng Dung dịch rửa này đúng cách sẽ giúp duy trì Hệ thống ở tình trạng vận hành tối ưu.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Dung dịch rửa iChemVELOCITY đã được xác định là không nguy hiểm theo hướng dẫn do OSHA ban hành trong tiêu chuẩn 29 CFR 1910. 1200(d).
- Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp liên quan đến thu thập, xử lý, bảo quản và thải bỏ mẫu xét nghiệm.
- Thải bỏ mọi dung dịch bị phai màu vì có thể chúng đã hỏng.
- Tránh để dung dịch tiếp xúc với mắt và da. Tham khảo Bảng dữ liệu an toàn để biết các biện pháp sơ cứu.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi xử lý.
- Tránh tiếp xúc lâu với da hoặc hít phải. Tham khảo Bảng dữ liệu an toàn để biết các biện pháp sơ cứu.
- Có thể xuất hiện các phản ứng dị ứng toàn thân đối với những người mẫn cảm.
- Tham khảo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc tiểu bang về phương pháp thải bỏ được khuyến nghị.

PHÂN LOẠI NGUY CƠ THEO GHS

Không được phân loại là nguy hiểm

SDS

Bảng dữ liệu an toàn có sẵn tại
techdocs.beckmancoulter.com

THÀNH PHẦN KHÔNG HOẠT TÍNH

- Nước
- Chất ổn định
- Chất bảo quản

BẢO QUẢN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH

- Bảo quản ở 20°C đến 28°C (68°F đến 82,4°F).
- Dung dịch rửa iChemVELOCITY sẽ ổn định trong mười hai tháng kể từ ngày sản xuất.
- Hạn sử dụng sau khi mở gói: Các dung dịch chưa sử dụng vẫn còn nguyên trong lọ đựng có nắp ban đầu sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn.
- Không làm lạnh
- Không để dung dịch tiếp xúc với ánh sáng.
- Không sử dụng dung dịch sau ngày hết hạn được in trên nhãn lọ.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP

- 2 x 7L Dung dịch rửa iChem VELOCITY
- Bộ lọc 2 x 1 µm

VẬT LIỆU CẦN THIẾT KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP

- Cụm ống dẫn dung dịch rửa iChem
- Thiết bị bảo hộ cá nhân

QUY TRÌNH

Tuân theo chỉ dẫn trong Hướng dẫn sử dụng của hệ thống. Hệ thống sẽ tự động thông báo cho người vận hành khi mức Dung dịch rửa thấp hơn mức tối thiểu theo yêu cầu.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Để biết thêm thông tin, hoặc nếu nhận được sản phẩm bị hỏng, hãy gọi Dịch vụ khách hàng của Beckman Coulter theo số 800-854-3633 (Hoa Kỳ hoặc Canada) hoặc liên hệ với Đại diện của Beckman Coulter tại địa phương.

Danh mục thuật ngữ ký hiệu (PN C27648) có sẵn tại techdocs.beckmancoulter.com.

NHÃN HIỆU

Beckman Coulter, logo cách điệu và các nhãn hiệu sản phẩm và dịch vụ của Beckman Coulter nêu trong văn bản này đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của Beckman Coulter, Inc. ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Có thể được bảo vệ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế. - xem trang www.beckmancoulter/patents.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản AA, 10/2018

Bản phát hành ban đầu

Phiên bản AB, 04/2019

Sửa lỗi yêu cầu ổn định của Nga

Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mill's Co. Clare, 爱尔兰

Beckman Coulter do Brasil Com. e Imp. de Prod. de Lab. Ltda
Alameda Rio Negro, 500, 15º andar, Torre B Alphaville Industrial
CEP 06.454-00 Barueri, São Paulo, Brasil
CNPJ: 42.160.812/0001-44 Telefone: 0800-771-8818

製造販売業者: ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063

東京都江東区有明三丁目5番7号

TOC有明ウエストタワー

ООО «Бекмен Культер», 109004 Москва, Россия, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3.

Тел. +7 (495) 228 67 00, e-mail: beckman.ru@beckman.com



Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills Co. Clare, Ireland (001) 703-527-3887
www.beckmancoulter.com