

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên đơn vị: Công ty TNHH NGÔ GIA PHÁT

Tên trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ

Model: 4M (1); 4M (2)

Hướng dẫn sử dụng:

- Mở bao gói để lấy sản phẩm.
- Cầm vào quai đeo, đưa sản phẩm lên vùng mặt. Mắc 2 dây đeo vào tai, kéo nhẹ cạnh trên che kín mũi, cạnh dưới kéo xuống quá cằm, vuốt thanh nẹp cho ôm khít sống mũi, dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ hai bên để ôm hai má.
- Khẩu trang chỉ dùng 01 lần.
- Sau khi sử dụng, cầm vào quai đeo để tháo khẩu trang ra, tránh chạm vào thân ngoài khẩu trang.
- Bỏ sản phẩm đã sử dụng vào thùng rác.



Ngô Thanh Quang