

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP**  
**(A&P Medical Protective Mask 4 PLY)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ – CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
Địa chỉ: C18 BT6 phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm,  
thành phố Hà Nội, Việt Nam

**1. Thành phần cấu tạo**

- 3 lớp vải không dệt, 1 lớp lọc khuẩn, thun đeo tai
- 4 nếp gấp, không thấm nước, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa PE đàn hồi tốt.

**2. Công dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.**

**Công dụng:**

Tác dụng kháng khuẩn, ngăn chặn khói bụi, ngăn ngừa vi khuẩn, vi rút.

**Cách dùng:**

Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

**Cảnh báo thận trọng :**

- Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

**Đóng gói:**

50 chiếc/túi nylon/hộp giấy.

**Bảo quản:**

Đậy kín nắp sau khi sử dụng, để nơi khô mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực tiếp, Bảo quản ở nhiệt độ 5°C-40°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**



*[Handwritten signature]*  
Vũ Thị Thu Phương