

## MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN AN PHÚ - CHI NHÁNH HÀ NỘI.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Địa chỉ chi nhánh: C18 BT6 phố Hoài Thanh, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở sản xuất: CƠ SỞ SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINAMASK

Địa chỉ xưởng: Lô E, đường số 7 KCN Hoà Khánh Bắc, P. Hoà Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Webiste: [www.apmico.com/](http://www.apmico.com/)

## KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

(Chủng loại: A&P Medical Protective Mask 4 PLY)

### 1. Thông tin cấu trúc sản phẩm

- 3 lớp vải không dệt, 1 lớp lọc khuẩn, thun đeo tai
- 4 nếp gấp, không thấm nước, không độc tố
- Thanh nẹp mũi bằng nhựa PE độ đàn hồi tốt

### 2. Kiểu dáng, kích thước

- Kích thước: Chiều dài 17,5cm; chiều rộng 9,5cm
- Đảm bảo che kín mũi và miệng

### 3. Cách sử dụng

- Khẩu trang có 02 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 02 dây thun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi; dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ 02 bên khẩu trang để ôm khít 02 má.

- Khẩu trang chỉ dùng 1 lần hoặc dùng tối đa trong ngày.

### 4. Quy cách đóng gói

- 50 chiếc/túi nylon/hộp giấy

### 5. Hạn sử dụng

Ghi trên bao bì

**6. Bảo quản**

- Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ 5<sup>0</sup>C-40<sup>0</sup>C

Số lô/ ngày sản xuất.....HSD

Số lưu hành/ Số công bố TTBYT: /

*Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

**GIÁM ĐỐC**



**VŨ THỊ THỦY**