

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (CHƯA TIỆT TRÙNG)

Tên gọi trước đây: Khẩu trang sản xuất từ vải không dệt (chưa tiệt trùng)

Mô tả sản phẩm:

- Khẩu trang có 3 nếp gấp song song nhau.
- Màu sắc: thuần màu xanh hoặc thuần màu trắng, hoặc 1 mặt màu xanh, 1 mặt màu trắng, tùy theo nhu cầu của khách hàng.
- Bề mặt vải sạch sẽ, trơn mịn, không sần sùi, không gây kích ứng da cho người đeo.
- Các mép khẩu trang ôm khít khuôn mặt người đeo.
- Dây đeo được đính chắc chắn tại 4 góc của khẩu trang và đảm bảo việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng.

Công dụng

Khẩu trang được sử dụng trong môi trường y tế (phòng mổ, phòng khám và nha khoa, phòng thí nghiệm) và trong môi trường công nghiệp. Khẩu trang có tác dụng ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe), ngăn vi sinh vật (lọc khuẩn), kháng giọt bắn đường hô hấp.

Hướng dẫn sử dụng

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.
- Dùng lực kéo căng nhẹ dây đeo để đeo vào tai (tròng dây quanh tai, ở mỗi bên tai)
- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

Lưu ý:

1. Trong lúc đeo dây vào tai tránh chạm tay vô phần mặt vải khẩu trang nhằm hạn chế việc lây nhiễm chất bẩn từ tay sang khẩu trang.
2. Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Không sử dụng chung khẩu trang với người khác.
4. Khẩu trang chỉ dùng một lần.

Bảo quản

Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

**Xác nhận của cơ sở
Giám đốc**


Nguyễn Văn Ninh