

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG N95**

- Bước 1: Đặt khẩu trang trên tay với phần mũi ở các đầu ngón tay, lòng bàn tay hứng khẩu trang và phần dây đeo thả buông phía dưới lòng bàn tay (nhìn hình trên).
- Bước 2: Đặt khẩu trang N95 trùm kín từ cằm đến mũi, phần nhọn nhọn hướng về phía mũi.
- Bước 3: Tay trái cầm cố định khẩu trang đảm bảo kín mũi đến cằm, tay thuận quàng dây ra sau đầu. Tròng 2 dây qua khỏi đầu, 1 dây kéo xuống phía dưới cổ, 1 dây buột phía trên đầu.
- Bước 4: Sau khi đã buột cố định khẩu trang chắc chắn, dùng tay vuốt theo khe mũi để đảm bảo phần nẹp của khẩu trang N95 bám sát mũi tránh để khe hở tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công vào hệ hô hấp (mũi, miệng).
- Bước 5: Dùng 2 tay kiểm tra thật kỹ phần cằm đến mũi. Dùng 2 tay bịt kín từ trên xuống dưới để đảm bảo khẩu trang ép kín vào tạo hình khuôn mặt mỗi người.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Hiền Lương