

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THAY DUNG DỊCH RỬA CHO MÁY HUYẾT HỌC MODEL : HEMATOLOGY CLEANER

Cách sử dụng như sau:

1. Mở nắp tất cả các bình dung dịch rửa (hematology cleaner)
2. Lau sạch bề mặt của các ống hút mẫu, và sau đó rửa bằng nước cất và sau đó đưa các ống hút hóa chất vào các bình tương ứng.
3. Chạy ít nhất 3 lần liên tục. lấp đầy dung dịch vào trong máy
4. Chạy giá trị nền. Ở lần đếm ngược đầu tiên có thể được nhìn thấy, nên thấp hơn bình thường sau một vài lần chạy.
5. Chạy tất cả ba mức máu chuẩn (Control). Kiểm tra các giá trị chấp nhận được.
6. Hiệu chỉnh lại máy nếu cần.thiết

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY VÀ LÀM XÉT NGHIỆM

1. Khi bật, tắt máy:

- Khi mất điện cần phải tắt máy ngay, đến khi bắt đầu có điện nên để nguồn điện ổn định từ 3 đến 5 phút ta mới bật máy. Nên dùng ổn áp để có điện áp ổn định.
- Chú ý không bật máy luôn sau khi vừa tắt máy. Sau ít nhất 30 giây để máy ổn định mới bật. Nếu bật, tắt đột ngột có thể gây cháy cầu chì và sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận khác của máy.

3. Cách bảo quản máy:

- Trước khi tắt máy phải rửa nhiều bằng dung dịch (VA-360 Cleanser) rồi mới tắt công tắc nguồn.
- Nên đặt máy ở nơi khô thoáng, không bị ẩm. Tốt nhất là có máy hút ẩm hoặc điều hoà.
- Hàng ngày dù không tiến hành làm xét nghiệm cũng nên bật máy 30 phút để tránh cho máy bị ẩm, mốc.