

## CÔNG TY TNHH LÂM MINH MÃN

Địa chỉ: 34 Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

#### KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP – MODEL: FRESH AIR

##### Hướng dẫn sử dụng:


- Bước 1: Hai tay cầm 2 sợi thun của khẩu trang áp sát khẩu trang vào mặt
- Bước 2: Đeo dây vào tai, ấn chặt nẹp mũi
- Bước 3: Một tay kéo phần trên khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và trán, sau đó bóp thanh nẹp mũi để cho ôm sát đồng thời tay còn lại kẹp phủ phần dưới khẩu trang cho bảo phủ xuống cằm.

**Lưu ý:** Khẩu trang chỉ sử dụng 1 lần, không nên giặt hay tái sử dụng

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát

Mục đích sử dụng: - Giúp che nắng, ngăn ngừa khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.

CÔNG TY TNHH LÂM MINH MÃN

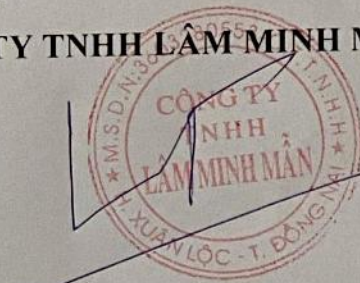

Bùi Hải Lâm