



## KHẨU TRANG Y TẾ

**Chủng loại:** 3 lớp và 4 lớp

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI  
HAVI VIỆT NAM**

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày tháng sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

Bảo hành: Không có

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.
- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai.
- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

**Đơn vị sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI  
HAVI VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 401/1/1 Trường Chinh, Phường Tân Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất: Số 16, đường số 12, khu 38 ha, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

SĐT: 0949329256