

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Khẩu trang Y tế

1. CẤU TẠO

- Tên sản phẩm: Khẩu trang Y tế
- Chung loại: Khẩu trang Y tế 3 lớp
- Mã sản phẩm: Havi.01
- Cấu tạo gồm:
 - Các lớp vải: 2 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có gấp nếp; Lớp lọc;
 - Thanh nẹp mũi bằng nhựa (trong có lõi kim loại hoặc không có);
 - Dây đeo thun chắc chắn.

2. CÔNG DỤNG

Dùng trong y tế, giúp che phủ mũi miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường dịch bệnh, môi trường độc hại nguy hiểm.

3. CÁCH DÙNG

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.
- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai.
- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.

Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 06 năm 2020

