

KHANG KHUAN
KHANG VIEM

NANO SEA FRESH



KHANG KHUAN
KHANG VIEM

XỊT KHANG KHUẨN NANO SEA FRESH

- VIÊM HỌNG
- VIÊM TAI
- VIÊM MŨI



SODIUM
CLORID
SILVER NANO
PEPPERMINT
ESSENTIAL OIL

Net:70ml 4.2 fl.oz



Hỗ trợ điều trị

THÀNH PHẦN

Sodium Clorid, Silver Nano (Nano Bạc), BenzalkoniumClorid, Peppermint essential oil (Tinh dầu Bạc Hài), tinh dầu khuynh diệp, tinh chất bô hôi, tinh dầu tràm, tinh chất trà xanh, tinh chất trầu không, Water (Nước tinh khiết vừa đủ).

MỨC ĐỘCH SỬ DỤNG

- Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm xoang mũi cấp và mãn tính, viêm mũi dị ứng, viêm tai, viêm họng. Dùng rửa mũi, sát khuẩn nhẹ nhàng.
- Kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng, viêm tai. Loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy nhờ cơ chế xịt phun sương, tạo các hạt mịn để đi sâu vào khoang mũi, giúp thông thoáng dễ thở và tạo cảm giác mát dịu.
- Dùng để xịt vết thương, vết loét trên da.

CÁCH DÙNG

1. Rửa sạch mũi theo chiều thẳng đứng.
2. Đặt ngón trỏ lên đầu gần với phun.
3. Đưa nhẹ nhàng với phun vào tường cabin bảo vệ, ấn nhanh đầu phun 1 lần.
- Viêm xoang mũi: Xịt vào mũi mỗi ngày 2-3 lần
- Viêm tai: Xịt mỗi ngày 3 lần.
- Viêm họng: Xịt họng mỗi ngày 3-4 lần.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- Dùng cho trẻ em từ 02 tháng tuổi trở lên. Người đối tượng với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, khi thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh để ngăn ngừa viêm mũi, viêm xoang, viêm họng.
- Người cần vệ sinh tai, mũi, họng.
- Người cần vệ sinh sát khuẩn lên vết thương hở.

XỊT KHANG KHUẨN NANO SEA FRESH

KHANG KHUAN
KHANG VIEM



XỊT KHANG KHUẨN NANO SEA FRESH

- VIÊM HỌNG
- VIÊM TAI
- VIÊM MŨI



SODIUM
CLORID
SILVER NANO
PEPPERMINT
ESSENTIAL OIL

Net:70ml 4.2 fl.oz



Hỗ trợ điều trị

LƯU Ý

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BAO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng có in trên bao bì.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VITAL PHARMA

Địa chỉ: Số nhà 52, ngõ 145, Phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AEROCHEMIE

Địa chỉ: Số 19, Đường Phúc Hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số tiếp nhận/Rng.No:

Số lô/Lot.No:

MSX/Infq.Date:

HSD/Exp.No:



KT: 55X45X160mm