

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
XỊT KHÁNG KHUẨN ALASKA**

THÀNH PHẦN:

Sodium Clorid, Silver Nano (Nano Bạc), Benzalkonium Clorid, Peppermint essential oil (Tinh dầu Bạc Hà), Tinh dầu Khuynh diệp, Tinh chất Lô hội, Tinh dầu Tràm, Tinh chất Trà xanh, Chiết xuất Hoa Cúc, Water (Nước tinh khiết vừa đủ).

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm xoang mũi cấp và mãn tính, viêm mũi dị ứng, viêm tai, viêm họng. Dùng rửa mũi, sát khuẩn miệng.
- Kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng, viêm tai. Loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy nhờ cơ chế xịt phun sương, tạo các hạt mịn để đi sâu vào khoang mũi, giúp thông thoáng dễ thở và tạo cảm giác mát dịu.
- Dùng để xịt vết thương, vết loét trên da.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cách dùng:

1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
2. Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun.
3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào vùng cần bảo vệ, ấn nhanh đầu phun 1 lần

Liều dùng:

- Viêm xoang mũi: Xịt vào mũi mỗi ngày 3-4 lần.
- Viêm tai: Xịt mỗi ngày 3 lần.
- Viêm họng: xịt họng mỗi ngày 4-5 lần.

Đối tượng sử dụng:

- Dùng cho trẻ em từ 02 tháng tuổi trở lên.
- Người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, khi thay đổi thời tiết, không khí khô lạnh để ngăn ngừa viêm mũi, viêm xoang, viêm họng.
- Người cần vệ sinh tai, mũi, họng.
- Người cần vệ sinh sát khuẩn lên vết thương hở.

LƯU Ý: Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần nào của sản phẩm.

Sản phẩm chỉ dùng ngoài, không được uống. Để xa tầm tay trẻ em.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng có in trên bao bì.

Thương nhân chịu trách nhiệm đăng kí và phân phối sản phẩm:

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM.


Địa chỉ: Số 12 ngách 179/187/5 tổ 48 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE**

Địa chỉ: Số 19, đường Phúc Hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

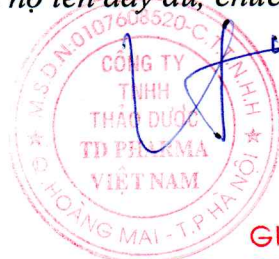

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hằng