

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ**

- Lấy khẩu trang ra khỏi túi;
- Điều chỉnh nẹp mũi vừa khít sống mũi;
- Đeo dây quai qua 2 vành tai;
- Kéo dẫn mép dưới của khẩu trang qua khỏi cằm và điều chỉnh cho vừa vặn.

Lưu ý:

- Sản phẩm sử dụng được ngay. Dùng cho người lớn, trẻ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để chống bụi hoặc trong phòng thí nghiệm, bệnh viện.
- Sản phẩm chỉ dùng một lần không sử dụng lại.
- Thay đổi khẩu trang khác khi bị nhiễm bẩn hoặc sử dụng lâu trong điều kiện môi trường có mật độ ô nhiễm, nguy cơ nguy hại cao.

GIÁM ĐỐC



**TRẦN BẢO SƠN
GIÁM ĐỐC**