

## TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành sản : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH

Địa chỉ: TDP Hòa do 6B, Phường Cam Phúc Bắc, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1		<b>Mô tả sản phẩm khẩu trang y tế</b>
1.1	<b>Mô tả trang thiết bị</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tên trang thiết bị:<ul style="list-style-type: none"><li>Khẩu trang y tế (Mã hàng: ODM16)</li><li>Cấu trúc: Được sử dụng 1 lần.</li><li>Có 4 lớp vải dạng phẳng, có gấp nếp, đảm bảo che kín mũi miệng;</li><li>Vải không dệt: sản phẩm 4 lớp (gồm lớp vải không dệt PP hợp quy, vải kháng khuẩn nano, vải lọc bụi SMS, thanh nẹp mũi, dây đeo, viền)</li><li>Màu sắc: đủ màu, có thể làm theo yêu cầu khác nhau.</li><li>Kích thước: Chiều dài: 17.5cm(+/-0.5cm), chiều rộng: 9.5cm(+/-0.5cm).</li></ul></li><li>Bao gói:<ul style="list-style-type: none"><li>Sản phẩm được đóng gói trong bao PE và hộp giấy kín, sạch hợp vệ sinh. Đảm bảo chất lượng sản phẩm.</li></ul></li></ol>
1.2	<b>Danh mục linh kiện và phụ kiện</b>	Vải PP không dệt (không thấm nước), lớp vải SMS vi lọc, lớp vải kháng khuẩn tằm nano bạc, thanh nẹp mũi, dây thun, viền.
1.3	<b>Mục đích/ Chỉ định sử dụng</b>	Đề bảo vệ vùng mặt, ngăn ngừa, bảo vệ người đeo không bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, dịch bệnh, bụi bặm thông thường qua đường hô hấp.
1.4	<b>Hướng dẫn sử dụng</b>	Khẩu trang có 2 mặt, đeo mặt trắng vào trong (Mặt trắng tiếp xúc với miệng và mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. <ul style="list-style-type: none"><li>Bước 1: Kéo dây ra;</li><li>Bước 2: Cầm vai đeo đặt khẩu trang bên dưới cằm, phần mũi hướng lên;</li><li>Bước 3: Cầm hai quai đặt khẩu trang đặt lên tai, kéo khẩu trang cho vừa vùng mũi và miệng, mặt;</li><li>Bước 4: Đặt đầu ngón tay hai bên phần mũi bằng . vuốt</li></ul>

		phần mũi khâu trang theo hình mũi; - Bước 5: chỉnh lại khâu trang cho vừa vặn. Khâu trang chỉ nên dùng 01 lần hoặc tối đa 01 ngày. Khi tháo bỏ không vứt bừa bãi mà phải cho vào thùng rác theo quy định để tránh vi khuẩn có cơ hội phát triển.
1.5	<b>Chống chỉ định</b>	Không có
1.6	<b>Cảnh báo và thận trọng</b>	Không có
1.7	<b>Tác dụng bất lợi có thể xảy ra</b>	Không có
2	<b>Thông tin lưu hành sản phẩm tại các nước (nếu có): không có</b>	
3	<b>Chỉ định đăng ký ở các nước (nếu có): không có</b>	
4	<b>Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm thiết bị y tế:</b> - Sản phẩm không có thông tin bất lợi	

Công Ty cổ phần May Cam Ranh cam kết những nội dung trên trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY CAM RANH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TIỀN ĐIỀN**