



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Miếng dán sưởi ấm cơ thể (body heating pad)

(Model: SAKURA; HAPPYGO; ĐV; DAVI; DAIKI; HACHI)

Thành phần:

Bột sắt, than hoạt tính, muối, nước,....

Chỉ định:

Sưởi ấm, giữ nhiệt cơ thể và tránh cảm lạnh. Giúp giảm đau, thư giãn ở vùng cơ thể đau nhức do lao động, chơi thể thao thời tiết thay đổi. Giúp giảm đau do đau bụng lạnh, phụ nữ đến kỳ kinh và sau sinh.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Bóc túi nilon theo vết cắt bên cạnh, 2. Bóc hai miếng giấy ở mặt sau. Mặt này có lớp keo và dán mặt có lớp keo vào mặt trong của áo khoác hoặc mặt ngoài áo trong nơi cần giảm đau hoặc sưởi ấm. Dán lên quần áo và tắt chân, không được dán trực tiếp lên da. Thời gian bắt đầu nóng khoảng 10 - 15 phút từ khi bóc lớp nilon ra. Đặc biệt, không được dán trực tiếp lên da. Lưu ý: Không dán trực tiếp lên da. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Thận trọng khi dùng cho trẻ em và khi ngủ. Không dán liên tục ở một vị trí vì dễ làm tổn thương da.

Chống chỉ định: Không dùng cho người bị sốt.

Lưu ý: Không dán trực tiếp lên da. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Thận trọng khi dùng cho trẻ em và khi ngủ. Không dán liên tục ở một vị trí vì dễ làm tổn thương da.

Bảo quản: Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Đóng gói 01 Miếng/túi.

Nhà sản xuất: Zhejiang Haobang Medical Supplies Co.,Ltd.

Địa chỉ: Block C, Dashawan Block, Jiantiao Town, Sanmen County, Zhejiang Province, China.

Nhập khẩu và phân phối: Công Ty TNHH Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Việt.

Số 4 lô 1G đường 11C, Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Hà Nội.