



## MẪU NHÃN

**Miếng dán sưởi ấm cơ thể: SAKURA; HAPPYGO; ĐV; DAVI; DAIKI; HACHI**

**Thành phần:** Bột sắt, than hoạt tính, muối, nước,....

**Đóng gói:** 1 miếng/túi; **Số CB lưu hành:** /PCBA-HN.

**Công dụng:** Sưởi ấm, giữ nhiệt cơ thể và tránh cảm lạnh. Giúp giảm đau, thư giãn ở vùng cơ thể đau nhức do lao động, chơi thể thao thời tiết thay đổi. Giúp giảm đau do đau bụng lạnh, phụ nữ đến kỳ kinh và sau sinh

**Cách sử dụng:** 1. Bóc túi nilon theo vết cắt bên cạnh, 2. Bóc hai miếng giấy ở mặt sau. Mặt này có lớp keo và dán mặt có lớp keo vào mặt trong của áo khoác hoặc mặt ngoài áo trong nơi cần giảm đau hoặc sưởi ấm.

**Cảnh báo:** Không dán trực tiếp lên da. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần. Thận trọng khi dùng cho trẻ em và khi ngủ. Không dán liên tục ở một vị trí vì dễ làm tổn thương da.

**Bảo quản:** Nơi thoáng mát và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp

**NSX,HSD,LOT:** Xem trên bao bì trực tiếp của sản phẩm.

**Xuất xứ:** Trung Quốc.

**Nhà sản xuất:** Zhejiang Haobang Medical Supplies Co.,Ltd.

**Địa chỉ:** Block C, Dashawan Block, Jiantiao Town, Sanmen County, Zhejiang Province, China.

**Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành:** Công Ty TNHH Dược và TTB Y Tế Đại Việt.

**Địa chỉ:** Số 4 lô 1G đường 11C, khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.