



NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nước súc miệng, họng DK-Ag+

Thành phần:

Nano bạc, Menthol, Propylene glycol, Cremophor RH40, Natri borate, Natri bicarbonate, Natri benzoate, Natri edetat, Poloxamer, Nước tinh khiết.

Công dụng:

- Nước súc miệng, họng DK-Ag+ với thành phần Nano bạc nhập khẩu từ Balan có tác dụng: Làm sạch răng miệng, kháng khuẩn, nấm, virus, bào tử vùng miệng họng; hỗ trợ ngăn ngừa và loại bỏ vi khuẩn, virus gây tổn thương ở miệng, họng, các vi khuẩn gây sâu răng, hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên dịu nhẹ.
- Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, nhiệt miệng và các bệnh răng miệng khác.
- Giúp phòng tránh các bệnh lây theo đường hô hấp như cúm thường, cúm A, H5N1, H1N1, chân tay miệng trẻ em,...

Đối tượng sử dụng:

Nên súc miệng hằng ngày làm sạch miệng, cho hơi thở thơm mát trong các trường hợp:

- Người thường xuyên phải đi công tác, lái xe, ăn uống, tiếp khách
- Người viêm lợi, nhiệt miệng, viêm họng, amidan, sâu răng, mảng bám răng, hôi miệng, chảy máu chân răng.
- Người cần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm lây qua đường miệng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hàng ngày súc miệng 2-3 lần, mỗi lần sử dụng 15-20ml dung dịch không pha loãng, hoặc pha loãng 2 lần với nước. Súc mạnh để nano bạc phân tán đều khoang miệng sau đó ngậm trong ít nhất 40-45 giây.
- Không cần súc lại bằng nước lọc.

Lưu ý:

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bị nhiễm khuẩn trong quá trình sử dụng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời.

Tiêu chuẩn: TCCS

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.