

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRANG PHỤC PHẪU THUẬT

## 1. Yêu cầu chung:

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng sản phẩm TRANG PHỤC PHẪU THUẬT do Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành sản xuất

## 2. Công dụng:

Dùng trong phòng mổ

## 3. Thành phần bao gồm:

- Áo
- Quần
- Bao giày
- Mũ phẫu thuật

## 4. Bao gói :

Một số quy cách đóng gói Trang phục phẫu thuật : 01 cái / gói, 02 cái/gói , 10 cái/gói ...

## 5. Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Vệ sinh tay
- Bước 2: Mở bao đựng sản phẩm tại vị trí open
- Bước 3: Đưa sản phẩm ra khỏi bao đựng sản phẩm
- Bước 4: Cầm mặt ngoài sản phẩm, mặc trang phục phẫu thuật vào cơ thể, thắt dây buộc tại các vị trí cho vừa khớp với cơ thể .
- Bước 5: Sau khi sử dụng xong tháo dây buộc tại các vị trí có nút thắt, cầm mặt phía sau của trang phục tháo trang phục ra ngoài  
Trong khi tháo cuộn mặt ngoài vào trong sau đó bỏ ngay vào thùng chất thải đúng quy định. Tránh tiếp xúc trực tiếp mặt ngoài của trang phục
- Bước 6: Vệ sinh tay.

## 6. Chống chỉ định : Không có

## 7. Cảnh báo an toàn:

Sử dụng an toàn khi bao gói không bị rách, hở và sản phẩm còn hạn sử dụng

## 8. Bảo quản:

Sản phẩm được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo đảm bảo vệ sinh

## 9. Vận chuyển :

Sản phẩm được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có mái che mưa nắng, hợp vệ sinh. Không được để các vật nặng đè lên thùng sản phẩm tránh làm vỡ thùng, làm hỏng sản phẩm

## 10. Thông tin tra cứu : Ngày sản xuất, ngày hết hạn, hạn sử dụng xem trên tem nhãn bao bì



**11. Thông tin liên hệ :**

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH**

Địa chỉ: Lô 52,53,54 cụm CN An Xá - Mỹ Xá - TP. Nam Định

ĐT: 0228 3 666 968 Fax : 0228 3 672 311 Website://www.anlanhgauze.com

Nam Định, Ngày 02 Tháng 06 Năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



*[Handwritten signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN CHÍ DŨNG**

