

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI T D&C

Địa chỉ: Số 23, đường số 69, tổ 8, Ấp Giữa, Xã Tân Phú Hưng, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 01 tháng 07 năm 2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>1. Tên sản phẩm: KHẨU TRANG Y TẾ BAO AN</p> <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân khẩu trang có nếp gấp phẳng, có 3-4 lớp- Thanh nẹp mũi: mềm, dễ uốn theo đường cong của mũi- Dây đeo: chắc chắn, có độ đàn hồi, được may đều 4 góc, ôm khít khuôn mặt <p>3. Quy cách đóng gói</p> <ul style="list-style-type: none">- Quy cách: 1 túi 10 sản phẩm; 1 hộp 5 túi; 1 thùng 50 hộp và đóng gói khẩu trang theo nhu cầu thị trường, nhu cầu khách hàng.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không
1.3	Đặc tính sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">- Khẩu trang có tác dụng ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp lọc kháng khuẩn cao cấp.- Thiết kế 3- 4 lớp, chất liệu vải tự nhiên, dày mịn.- Thiết kế thông minh với thanh nẹp mũi định hình.- Được sản xuất ở Việt Nam với dây chuyền công nghệ khép kín.- Không thấm nước, không gây dị ứng da, an toàn cho người sử dụng.- Dây đeo đàn hồi mềm mại, không gây cảm giác đau tai khi sử dụng lâu dài nên giúp dễ dàng hít thở, đem lại cảm giác thoải mái khi đeo
1.4	Ứng dụng sản phẩm	<ul style="list-style-type: none">- Bệnh viện, phòng khám, nha khoa- Trung tâm thẩm mỹ- Môi trường công nghiệp- Phòng dịch bệnh- Sử dụng chống khói bụi hằng ngày
1.5	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Bước 1: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang.



		<ul style="list-style-type: none"> - Bước 2: Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. - Bước 3: Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài. - Bước 4: Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Hiện tại chưa ghi nhận
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Hiện tại chưa ghi nhận
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước:	Không có
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác:	Không có
4	Thông tin về tính an toàn:	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật
Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



PHAN NGỌC NGUYỄN CHI

