

# CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SH CAMPUS

Địa chỉ: Thửa 7, Lô 8A2 Khu ĐTM Ngã Năm Sân Bay Cát Bi, Phường Đằng Giang,  
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### KHẨU TRANG Y TẾ

**Chủng loại: SH CAMPUS 3 lớp, SH CAMPUS 4 lớp**

#### 1. Mô tả:

- Khẩu trang y tế là khẩu trang có từ 2 đến 4 lớp vải không dệt, 1 lớp vi lọc hoặc/và giấy( vải) lọc kháng khuẩn.
- Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình cao, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

#### 2. Mục đích sử dụng:

- Bảo vệ sức khỏe.
- Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, vi khuẩn, vi rút... vào đường hô hấp.
- Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.

#### 3. Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai.
- Nấn thanh tựa mũi tạo độ kín khít, ôm sát khuôn mặt người dùng.
- Chụp khẩu trang kín mũi miệng.

#### 4. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng hoặc sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra

#### 5. Điều kiện bảo quản:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.



