

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

### **Dung dịch xịt mũi SHAMIXOAN**

#### **1. THÀNH PHẦN**

Dung dịch xịt mũi SHAMIXOAN gồm các thành phần:

Dịch chiết cây ngũ sắc, Dịch chiết bạch chỉ, Dịch chiết ké đầu ngựa, NaCl, Cetyl-pyridinium Chloride, Tinh dầu bạc hà, Kali sorbate, Tween 20, Nước cất vừa đủ.

#### **2. CÔNG DỤNG**

- Hỗ trợ rửa trôi dịch nhầy, bụi bẩn trong mũi. Giúp ngừa khuẩn, kháng viêm.
- Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm đa xoang, viêm xoang mãn tính, viêm xoang lâu năm, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính, ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi, chảy dịch mũi, mũi vàng hôi tanh.
- Hỗ trợ điều trị đau đầu, nhức hốc mắt, nhức chân mày, nhức gò má do viêm xoang.

#### **3. CÁCH DÙNG**

Lắc nhẹ sản phẩm, xịt trực tiếp vào 2 bên mũi, hít 1 hơi nhẹ cho thảo dược đi sâu vào khoang mũi. Xịt 3-4 lần/ngày hoặc nhiều hơn khi cần thiết.

#### **4. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG**

- Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên.
- Trẻ em dùng phải có sự hướng dẫn của người lớn.

#### **5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

#### **6. BẢO QUẢN**

- Để sản phẩm nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020*

