

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại cố định: 02083858508 Email: info@tng.vn

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

TCCS: 03/2020/QĐ-TNG

Lần soát xét: 01

Model: KN95 (5 lớp)

KHẨU TRANG Y TẾ KN95

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 09 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



NGUYỄN VĂN THỜI

KHẨU TRANG Y TẾ KN95 (KN95 (5 lớp))

CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm **KHẨU TRANG Y TẾ KN95** được quyết định ban hành và công bố áp dụng bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**.

Số hiệu tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm **KHẨU TRANG Y TẾ KN95** là: TCCS: 03/2020/QĐ-TNG ban hành lần 2 ngày: 18/08/2020 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xây dựng dựa theo TCVN 8389-1:2010 khẩu trang y tế thông thường.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khẩu trang y tế KN95 được sử dụng trong các cơ sở y tế: Bệnh viện, phòng khám và nha khoa, thẩm mỹ. Phòng tránh khói bụi, hóa chất độc hại. Ngăn ngừa vi khuẩn, vi sinh vật, các bệnh lây qua đường hô hấp. Sản phẩm được sử dụng trong bệnh viện, các môi trường làm việc khác do công ty sản xuất và phân phối.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung

- Khẩu trang y tế không gây kích ứng da cho người đeo.
- Bề mặt khẩu trang luôn phải sạch, không còn đầu sợi vải, không có lỗi ngoại quan.
- Dây đeo được dập máy chắc chắn hoặc được may vào 4 góc của khẩu trang có độ đàn hồi tốt.
- Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.

2.2. Cấu tạo sản phẩm:

a. Tên sản phẩm: **KHẨU TRANG Y TẾ KN95 (KN95 (5 lớp))**

b. Chất liệu - Thành phần cấu tạo:

- Các lớp vải: 5 lớp vải không dệt.
- Lớp vi lọc: vải lọc chất lượng cao.
- Lớp bông: Tạo độ mềm mại cho người sử dụng.
- Sản phẩm có dạng hình khối khi nhìn trực diện.
- Thanh nẹp mũi.
- Dây đeo.

2.3. Kiểu dáng, kích thước

003
ÔN
PH
THU
T
GUYE

Thiết kế kiểu dáng phù hợp với khuôn mặt, ôm kín vùng miệng và mũi, chất liệu vải không dệt mịn, mềm mại mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu cho người sử dụng. Khẩu trang y tế ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn và các bệnh lây qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc. Ngoài ra, khẩu trang tác dụng là ngăn bụi, ngăn hóa chất (kể cả khói xe) và ngăn vi sinh vật. Dây quai bằng thun giữ khẩu trang ôm sát và kín vùng mặt, thanh nẹp mũi mềm, dễ uốn cong giúp ôm sát vùng mũi và không bị bung trở lại.

2.4. Yêu cầu đối với vật liệu:

2.4.1. Lớp vải:

- Sử dụng vải không dệt, không hút nước.

2.4.2. Lớp vi lọc:

- Thấu khí, không thấm nước.

2.4.3. Lớp bông:

- Được làm từ 100% polyester.

2.4.4. Thanh nẹp mũi:

- Bằng nhựa 100% PVC hoặc kim loại mềm.
- Có tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi.

2.4.5. Dây đeo:

- Dây đeo bằng dây thun, giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

2.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật:

Bảng 1- Các chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang

Tên chỉ tiêu	Mức
1. Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30 L/min, %, không nhỏ hơn	90
2. Trở lực hô hấp (ΔP), ở chế độ thổi khí 30 L/min, mmH ₂ O, không lớn hơn	9
3. Giới hạn trường nhìn, %, không lớn hơn	6
4. Khối lượng, g, không lớn hơn	10

Bảng 2: Giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng có trong vải không dệt

TT	Nội dung	Giới hạn cho phép, không lớn hơn mg/kg sản phẩm
1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg
2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg
3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg
4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg
5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg

3. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

3.1. Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói theo quy cách: (50 chiếc/hộp, 2500 chiếc/ thùng... hoặc tùy theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng) được gói kín trong túi nhựa PE, đóng trong hộp giấy có in hình tem nhãn của Công ty và đóng thùng carton có lớp túi nilon bên trong... tùy theo yêu cầu của khách hàng thì quy cách đóng gói có thể được thay đổi cho phù hợp.


3.2. Ghi nhãn

Trên nhãn sản phẩm được ghi các nội dung phù hợp theo quy định tại **Nghị định 43/2017/NĐ-CP** về nhãn hàng hóa và các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước, tối thiểu bao gồm:

- Tên sản phẩm.
- Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ nhà xưởng, thành phần cấu tạo, nguyên liệu các chỉ tiêu chất lượng chính.
- Số tiêu chuẩn công bố.
- Số đăng ký lưu hành.
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản...

3.3. Bảo quản

Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh. Tránh những nơi ẩm mốc, côn trùng, nguồn nhiệt hay ánh sáng mặt trời trực tiếp gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thùng carton phải đặt lên pallet cách mặt đất 20cm.

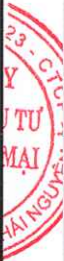

3.4. Vận chuyển

Khi vận chuyển bảo quản không để sản phẩm chung với các chất độc hại, dễ gây cháy nổ, hóa chất. Tránh chòng chát, tránh mưa hay ánh nắng hay các yếu tố khách quan khác gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

3.5. Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

