


- 1st Layer: Non-woven fabric: 100% Polypropylene
 Lớp 1: Vải không dệt: 100% Polypropylene
- 2nd Layer: Filter layer
 Lớp 2: Màng vi lọc
- 3rd Layer: Padding
 Lớp 3: Lớp bông
- 4th Layer: Filter layer
 Lớp 4: Màng vi lọc
- 5th Layer: Non-woven fabric: 100% Polypropylene
 Lớp 5: Vải không dệt: 100% Polypropylene

www.tng.vn | Hotline: +84 912103690

KHẨU TRANG Y TẾ KN95

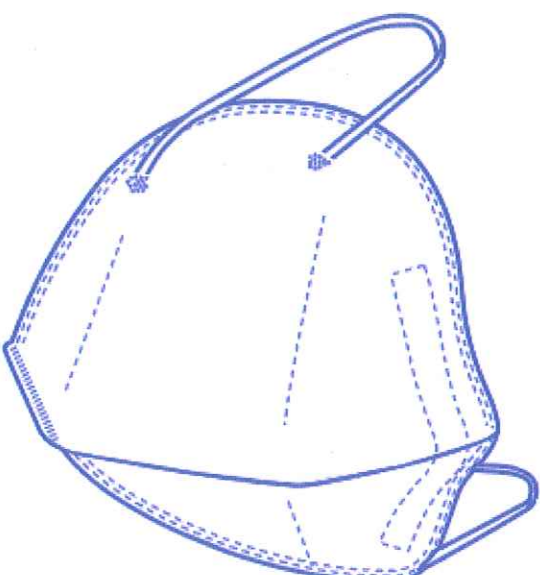

- HIỆN DẠI
- KHÁNG NƯỚC
- CHỐNG HƠI HƠM
- TRONG LƯỢNG NHÉ
- DÂY ĐEO NIỀM NHU
- ĐÍNH 1 LÀN
- TRỌNG NHẤT ĐƯỢC HẸNG NGÀY

Sản xuất tại Việt Nam

20CHIẾC/HỘP

TNG

• Đây không phải khẩu trang phẫu thuật

This is not a surgical grade mask

• Sản phẩm của Công Ty TNHH

Disposable Fashion Đầu Tư

• Thời gian sản xuất: 2023

MFG date: 2020.TNG

• Hạn sử dụng: 2023

Exp date: 2023

• Sản xuất tại Việt Nam

Made in Viet Nam


• Lot No. (Số Lô):

• Model: KN95
Mã SP: KN95

• Facility Standard: Q3/2020/QĐ-TNG
TCCS: 03/2020/QĐ-TNG

MEDICAL FACE MASK

KN95

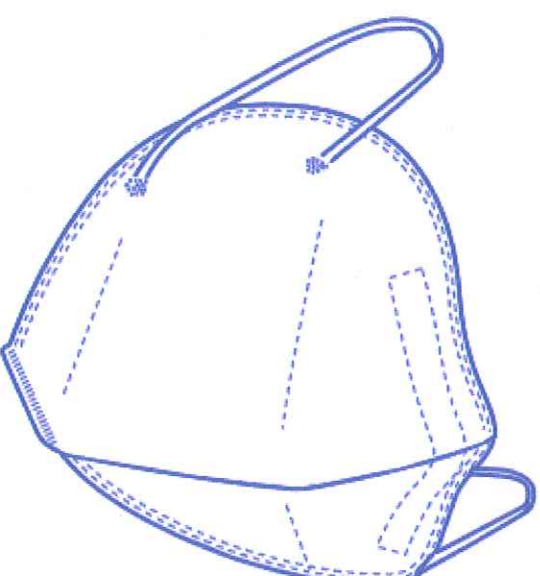

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

INSTRUCTIONS



Wash your hands thoroughly with soap and water for at least 20 seconds before touching the mask. Rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20s trước khi đeo khẩu trang.



Avoid touching the front of the mask. Only touch the earloops when removing. Keep hands in hygiene. Không chạm vào bề mặt ngoài của khẩu trang, chỉ chạm vào dây đeo khẩu trang. Rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi sử dụng.



Hold the mask by the earloops. Place around each ear and adjust to fit comfortably. Châm vào dây đeo khẩu trang, chỉnh qua tai. Giữ chặt dây đeo tránh rơi vãi khẩu trang.




Put the mask in the recycle bin after use. Đeo khẩu trang vào thùng rác sau khi sử dụng.

WARNING



-This mask is not reusable and cannot be washed.
-This mask is not reusable and cannot be washed.
- Khẩu trang sử dụng 1 lần. Không được giặt, giặt sẽ làm mất hiệu lực bảo hộ.

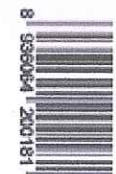

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY
TNG INVESTMENT AND TRADING JSC
434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province,
Vietnam, 24000.

Made in Viet Nam

20PCS/BOX

TNG

STYLISH DESIGN
WATER RESISTANT
ANTI-FOG

LIGHT WEIGHT
SOFT ELASTIC
EAR LOOPS

DISPOSABLE
COMFORTABLE TO
WEAR DAILY