

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM/ DANG NAM FINANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở: 281/19/17 Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 281/19/17 Le Van Si Street, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam;

Địa chỉ cơ sở sản xuất: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINA FACEMASK MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM/ SOUTHERN VINA FACE MASK PRODUCTION FACTORY- DANG NAM FINANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY - 151/105 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 151/105 Interregional 4-5, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

## 1. MÔ TẢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

GĂNG TAY KHÁM BỆNH VINAGLOVE/ VINAGLOVE EXAMINATION GLOVE  
Mã 01/2020/VINAGLOVE

- Là sản phẩm khẩu trang dùng 01 lần, là dạng găng tay cao su không bột, không tiết trùng, đầu ngón tay nhám. Được làm từ 100% cao su tự nhiên, không xử lý tiết trùng, sử dụng được cho cả 2 tay. Đầu ngón tay nhám để thuận tiện trong thao tác.
- Kích thước chiều dài & chiều rộng của sản phẩm tùy theo Size từ S đến XL theo tiêu chuẩn cơ sở;

## 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi sử dụng xác định rõ kích thước bàn tay người sử dụng để lựa chọn size găng tay chính xác tránh bị rách. Lựa chọn 1 đôi (2 cái) găng tay bất kỳ, với tính năng sử dụng linh hoạt cho cả 2 tay, người dùng không phải mất thời gian cho việc lựa chọn.
- Thực hiện phẩy nhẹ găng tay để giúp găng tay thẳng lại, không kết dính các ngón và lòng bàn tay.
- Đeo bao tay vào các ngón tay trước, kéo dần vào lòng bàn tay. Từ lòng bàn tay kéo toàn bộ găng tay ra sau cổ tay, đảm bảo cổ găng tay ra đến cổ tay. Không kéo trực tiếp cổ găng tay từ lòng bàn tay ra cổ tay vì rất dễ rách nếu kéo mạnh.
- Tránh để móng tay, đeo các vật có móc nhọn hoặc kim loại nhám: nhẫn, vòng, lắc...

## 3. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Không tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.
- Tránh sử dụng trực tiếp với hóa chất.
- Nếu da bị mẫn cảm, ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

Giám Đốc



*Dang Hong Nam.*