

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM

Tên trang thiết bị y tế: KHẨU TRANG Y TẾ

Model: DK-MASK-4 lớp

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Rửa sạch tay với nước rửa tay có chứa cồn hoặc xà phòng

Bước 2: Đeo khẩu trang bằng cách chỉ chạm vào quai đeo tai. Giữ cả hai bên quai và vòng qua mỗi tai

Bước 3: Chỉnh khẩu trang sao cho vừa với miệng, mũi, cằm và đảm bảo không có khoảng trống giữa khuôn mặt bạn và khẩu trang

Lưu ý:

- Tháo khẩu trang từ phía sau bằng cách giữ dây đeo tai
- Vứt bỏ khẩu trang ngay lập tức trong thùng rác kín, rửa sạch tay với nước rửa tay có chứa cồn hoặc xà phòng và nước
- Tránh chạm tay vào khẩu trang trong khi sử dụng

GIÁM ĐỐC

