

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<b>Tên trang thiết bị</b>	ĐÈN MỎ, ĐÈN KHÁM MODEL : AMNOLED 2, AMNOLED 3, AMNOLED 4, AMNOLED 5, AMNOLED 6, AMNOLED 7, AMNOLED 8
<b>Chỉ định</b>	Dùng cho phòng mổ, phòng khám..
<b>Hướng dẫn sử dụng, vệ sinh</b>	<p>Tuân thủ nghiêm theo Hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Đưa đầu đèn đến vị trí chiếu mong muốn bằng cách nắm tay điều khiển có thể khử trùng</li><li>(2) Bật công tắc nguồn chính (I) trên bảng điều khiển</li><li>(3) Bấm nút (+) hoặc (-) để điều chỉnh cường độ sáng trên bảng điều khiển đến mức độ sáng mong muốn .</li><li>(4) Xoay tay cầm điều khiển để điều chỉnh Focus mức đường kính trường sáng mong muốn (mức điều chỉnh : theo từng model)</li><li>(5) Tắt: Bấm nút công tắc (I) trên bảng điều khiển</li></ol> <p>Tháo tay cầm điều khiển có thể khử trùng để vệ sinh và khử trùng. Lắp tay cầm đã được khử trùng cho đèn để sẵn sàng cho mổ lần sau</p> <p>Đèn mổ/ đèn khám cần được vệ sinh định kỳ hàng ngày bằng dung dịch vệ sinh đã được cấp phép lưu hành.</p>
<b>Bảo dưỡng</b>	Bảo dưỡng theo đúng yêu cầu của NSX, và người thực hiện bảo dưỡng phải là kỹ thuật viên được đào tạo.
<b>Cảnh báo</b>	Không tự ý tháo, lắp, can thiệp vào thiết bị Tuân thủ các yêu cầu về an toàn điện Không sử dụng cho các mục đích khác Cần thông báo ngay cho nhà cung cấp mỗi khi có sự cố



GIÁM ĐỐC  
*Lê Khánh Vân*