

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất:

Xưởng sản xuất TTBYT: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Xưởng sản xuất TTBYT: XÍ NGHIỆP ĐỒNG XUÂN KHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI; Địa chỉ: KM 1814 +500, Quốc Lộ 1A, Ấp Nông Doanh, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Ngày 09 tháng 09 năm 2020

1. MÔ TẢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ÁO CHOÀNG Y TẾ CẤP 2/ LEVEL 2 - MEDICAL GOWN

Mã: AC01-(SM, UM); AC05-2

- Đặc tính kỹ thuật: chống nước của vải không dệt có mức định lượng 42~63gsm;
- Là sản phẩm áo choàng có tay, sử dụng 01 lần, để che chắn phần phía trước cơ thể khỏi các môi trường lây nhiễm bên ngoài;
- Kích thước chiều dài & chiều rộng của sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở hoặc đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở túi đựng sản phẩm, mở và kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.
- Mặc bao phủ toàn bộ cơ thể ở phía trước, điều chỉnh bo thun vừa khít tay và cổ, cột dây để cố định áo trong quá trình sử dụng
- Sau khi sử dụng xong, rút dây cột và cởi bỏ khéo léo để tránh nhiễm chéo, vứt bỏ đúng nơi quy định.

3. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Không tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc khi phát hiện có vết thủng, rách trên bề mặt sản phẩm;
- Tránh sử dụng trực tiếp với hóa chất.
- Nếu da bị mẫn cảm ở vùng tiếp xúc với vải, ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Dũng