



## **HAPAKU - Gói thảo dược chườm nóng lạnh - đa năng** (Làm nóng bằng lò vi sóng)

### **Thành phần:**

Ngải cứu, Gừng, Thiên niên kiện, Nghệ, Xuyên khung, Cù sả, Tinh dầu Tràm, Gạo, Bạch Chi, Trần bì, Quế, Hồi, Vò bưởi, Cam thảo, Quyết minh tử.

### **Công dụng:**

Giúp làm ấm, giảm đau mỗi vai gáy, lưng, hông và vùng bụng.

### **Đối tượng sử dụng:**

Người bị đau mỗi vai gáy cổ, thoái hóa, đau dây thần kinh tọa hoặc đau do phải đứng hoặc ngồi lâu trong một tư thế, khí huyết lưu thông kém.

Người bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ

Phụ nữ bị đau bụng kinh

### **Hướng dẫn sử dụng:**

B1: Bỏ túi chườm ra khỏi túi nilon

B2: Gập gọn và cho túi chườm vào lò vi sóng (microwave), quay ở chế độ làm nóng cao nhất trong vòng 2-3 phút. Có thể xịt một chút nước sạch vào túi chườm trước khi quay trong lò vi sóng.

Nếu chườm lạnh cho vào túi nilon, và đặt trong ngăn đá tủ lạnh từ 2-3h.

B3: Dùng gói đầu hoặc chườm vai gáy, lưng, bụng theo nhu cầu

### **Thời hạn sử dụng:**

2 năm (tương đương khoảng 200 lần sử dụng). Lượng thảo dược sẽ hết dần, tuy nhiên vẫn có thể được sử dụng như một túi chườm nóng đa năng.

**Bảo quản:** Bảo quản trong túi nilon kín, để nơi khô ráo, tránh ẩm ướt.

### **Chống chỉ định:**

Chống chỉ định trong các trường hợp: Vùng có khối u ác tính, giãn tĩnh mạch, không dùng trên các vùng niêm mạc hở, vết thương mới đang xung huyết.

Phải theo hướng dẫn của thầy thuốc và trợ giúp của người khác khi sử dụng với người tiểu đường hoặc huyết áp cao.

### **Lưu ý:**

Không đeo đai khi trong khi ngủ

Không đeo đai và nằm lên chần, đệm điện

Không gấp, gập đai khi đang cắm điện.

### **Sản phẩm thuộc sở hữu và được phân phối bởi:**

**CÔNG TY CP TV & ĐT SEN CAPITAL**

Số 28, Liên kê 8, Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (+84) 62596316 Hotline: (+84) 901576969

### **Sản xuất bởi:**

**CÔNG TY TNHH ECOVITA**

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.