



Hướng dẫn sử dụng

HAPAKU – Túi chườm thảo dược – Lưng bụng

(Làm nóng bằng lò vi sóng)

Thành phần:

Ngải cứu, gừng, Thiên niên kiện, Nghệ, Xuyên khung, Củ sả, Tinh dầu Tràm, Gạo, Bạch Chi, Trần bì, Quế, Hồi, Vỏ bưởi, Cam thảo, Quyết minh tử.

Công dụng:

Giúp làm ấm, giảm đau mỗi lưng và vùng bụng.

Đối tượng sử dụng:

Người bị đau mỗi lưng do thoái hóa, thoát vị đĩa đệm hoặc đau do phải làm việc lâu ở một tư thế cố định.

Người cần làm giãn cơ để làm vật lý trị liệu.

Phụ nữ bị đau bụng kinh

Hướng dẫn sử dụng:

B1: Bỏ túi chườm ra khỏi túi nilon

B2: Cho túi chườm vào lò vi sóng (microwave) ở chế độ làm nóng cao nhất trong vòng 2-3 phút. Có thể xịt một chút nước sạch vào túi chườm trước khi quay trong lò vi sóng. Nếu chườm lạnh thì có thể bỏ vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng từ 2-3h.

B3: Chườm lên vùng cơ thể bị đau mỗi và thư giãn. Có thể đi lại hoạt động bình thường cho đến khi túi chườm nguội hẳn.

Thời hạn sử dụng:

2 năm (tương đương khoảng 200 lần sử dụng). Lượng thảo dược sẽ hết dần, tuy nhiên vẫn có thể được sử dụng như một túi chườm nóng đa năng.

Bảo quản: Bảo quản trong túi nilon kín, để nơi khô ráo, tránh ẩm ướt.

Lưu ý:

Nhiệt độ túi chườm sau khi làm nóng từ 60-70°C. Vui lòng kiểm tra mức độ chịu nhiệt trước khi sử dụng. Trong 24 giờ đầu, nếu xuất hiện tình trạng sưng phù thì không nên sử dụng tiếp.

Nên lót một lớp khăn mỏng hoặc áo mỏng để cách ly túi chườm và da.

Không chườm lên niêm mạc, hoặc vùng da có vết thương hở

Với vùng da bị bầm tím, sưng viêm chỉ được dùng với liệu pháp chườm lạnh.

Không dùng nếu dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Sản phẩm thuộc sở hữu và được phân phối bởi:

CÔNG TY CP TV & ĐT SEN CAPITAL

Số 28, Liên kê 8, Khu Đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

SĐT:

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH ECOVITA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Phần Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.