

Số: 092020/FCA

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 09 năm 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHẨU TRANG Y TẾ FRESHER
Chủng loại: 3 lớp, 4 lớp

1. Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang.
- Chụp khẩu trang kín mũi và miệng.
- Kéo dây thun vòng qua tai điều chỉnh thanh tựa mũi tạo độ kín.

2. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

3. Điều kiện bảo quản:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

Bắc Ninh, Ngày 23 tháng 09 năm 2020



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN SỸ HUY