

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ EUROVINA TRAVEL

Địa chỉ: Số 47, Ngõ 255, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	KHẨU TRANG Y TẾ
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Khẩu Trang Y TẾ được sử dụng 1 lần có tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, hóa chất (kể cả khói xe). Hỗ trợ phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay được sử dụng trong môi trường y tế (phòng thăm mỹ, bệnh viện, phòng khám và nha khoa) hoặc làm việc trong môi trường công nghiệp độc hại <ul style="list-style-type: none">- 100% nguyên phụ liệu sạch.- Dây thun: Thun mềm, độ đàn hồi tốt.- Lớp giữa: Lớp kháng khuẩn.- Lớp trong & ngoài: Vải không dệt.- Thanh nẹp mũi: Bằng nhựa PVC.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Hộp giấy, bao gói
1.3	Mục đích/chỉ định sử dụng	Tác dụng ngăn ngừa bụi bẩn, hóa chất (kể cả khói xe). Hỗ trợ phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp nhờ lớp vi lọc. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay được sử dụng trong môi trường y tế (phòng thăm mỹ, bệnh viện, phòng khám và nha khoa) hoặc làm việc trong môi trường công nghiệp độc hại
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh khẩu trang sao cho:<ul style="list-style-type: none">+ Vừa khít với khuôn mặt, phải che kín cả mũi lẫn miệng.+ Mặt có logo của khẩu trang hướng ra bên ngoài do mặt này có tính năng chống nước.+ Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai.- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp mũi lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.- Lưu ý: Đối với khẩu trang y tế kháng khuẩn được đóng bịch: Khi xé bịch để lấy khẩu trang sử dụng, nếu không dùng hết khẩu trang ở trong bịch đã xé, bạn nên cho lại vào bịch để dán hoặc cột kín lại.
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none">- Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động



		<p>tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.</p> <p>- Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm vi rus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.</p> <p>- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn</p> <p>- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy.</p> <p>- Rửa tay ngay sau khi tháo bỏ khẩu trang.</p> <p>- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.</p>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước :	Không có
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác :	Không có
4	Thông tin về tính an toàn /vận hành đáng chú ý của sản phẩm trang thiết bị y tế :	không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai trên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Lê Thị Thanh Tâm

