

# TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế Dung dịch vệ sinh mũi Sinumax Chủng loại: Optiz	
1.1	Mô tả trang thiết bị	Dung dịch vệ sinh mũi Sinumax được sản xuất theo TCCS 003:2020/OPTIZ Thành phần: - Borneol - Menthol - Natri clorid - Benzalkonium clorid - Nước tinh khiết vừa đủ
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	+ Dung dịch vệ sinh mũi Sinumax được bào chế dưới dạng xịt phun sương tạo các hạt mịn dễ dàng đi sâu vào khoang mũi, được sử dụng để vệ sinh mũi hàng ngày, giúp loại bỏ các dị nguyên, giúp làm sạch, làm ẩm, phục hồi lại độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi, giúp mũi thông thoáng, giảm nghẹt mũi, mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt khi niêm mạc mũi bị khô, khó chịu khi thời tiết hanh khô hoặc trong phòng điều hoà, máy lạnh. + Sản phẩm kết hợp Borneol tự nhiên, menthol giúp hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh và các bệnh vùng tai, mũi, họng..

1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng</li> <li>+ Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun</li> <li>+ Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào lỗ mũi, ấn nhanh đầu phun từ 2-3 lần mỗi bên mũi, để dung dịch dư kéo chất nhầy chảy ra ngoài, hỉ sạch và lau mũi.</li> <li>+ Lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ</li> <li>+ Dùng: ngày 3-6 lần, mỗi lần 1-2 nhát xịt mỗi bên mũi. Có thể dùng tăng nếu thấy cần thiết.</li> </ul>
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng</li> <li>+ Nên sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ khi mở nắp</li> <li>+ Không sử dụng cho các mục đích khác</li> </ul>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ sử dụng một lần, không sử dụng lại. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Không sử dụng khi có dấu hiệu không còn nguyên vẹn sản phẩm.</li> <li>- Dùng đúng mục đích không sử dụng cho mục đích khác</li> </ul>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Sử dụng và bảo quản đúng quy định sẽ không có hậu quả bất lợi xảy ra.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) Việt Nam	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Linh Trường